

Link do produktu: <https://sklepmedyczny.net/irygator-do-nosa-pic-solution-rino-shower-new-p-298.html>



Irygator do nosa PiC Solution Rino Shower New

| | |
|------------------|---|
| Cena | 33,99 zł |
| Dostępność | Aktualnie niedostępny |
| Czas wysyłki | 13 dni |
| Numer katalogowy | RINO SHOWER NEW |
| Kod producenta | RINO SHOWER NEW |
| Producent | Pic Solution |
| CE | To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą |

Opis produktu

Irygator / nebulizator PiC Solution Rino Shower

Najnowszy model mikronizującego irygatora PiC Solution z delikatnymi końcówkami

Idealny do nawilżania i oczyszczania jamy nosowej, zatok

Przeznaczony do nawilżania i oczyszczania jamy nosowej, nosogardzieli. Usuwa wydzieliny, śluz i katar

Wytwarzane przez Rino Shower cząsteczki posiadają średnicę odpowiednią do górnych dróg oddechowych

Dla większej higieny i wygody terapii, posiada wbudowany pojemnik na wydzieliny.

Zaufaj 50-letniemu doświadczeniu w tworzeniu innowacyjnych i prostych w użyciu rozwiązań do domowej i profesjonalnej opieki zdrowotnej!

Opis produktu:

- do oczyszczenia nozdrzy i usunięcia wydzielin przed terapią nebulizacyjną dla zwiększenia jej efektywności poprzez oczyszczenie górnych dróg oddechowych
- do terapii z dodatkiem zaleczonego lekarstwa
- 2 miękkie końcówki (dla dorosłych i dla dzieci)
- higiena i wygoda - wbudowany pojemnik na wydzieliny
- pojemność zbiornika na roztwór do irygacji: 8 ml
- prosta obsługa jednym przyciskiem
- łatwe czyszczenie

Sposób użycia:

1. ściągnąć nasadkę donosową, wyciągnąć niebieski pojemnik
2. wlać sól fizjologiczną (max 8 ml)
3. włożyć niebieski pojemnik, założyć nasadkę donosową
4. podłączyć wężyk z inhalatora tłokowego i uruchomić kompresor
5. zbliżyć pojemnik do nosa
6. uruchomić irygację zatykając palcem otwór w obudowie irygatora

Uwaga: Rino Shower współpracuje z inhalatorem tłokowym, nie pracuje samodzielnie
(nie jest kompatybilny z inhalatorami Omron C802, Omron C803)

W zestawie:

- Irygator PiC Solution Rino Shower New
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Karta gwarancyjna
- Dowód zakupu: paragon lub faktura vat

Gwarancja: 2 lata

Bezpieczeństwo

Informacje o producencie i osobie odpowiedzialnej: Produkt wprowadzony do obrotu przed 13.12.2024r.