

Link do produktu: <https://sklepmedyczny.net/irygator-do-nosa-pic-solution-rino-shower-new-p-298.html>



## Irygator do nosa PiC Solution Rino Shower New

Cena	<b>33,99 zł</b>
Dostępność	<b>Aktualnie niedostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1 dzień</b>
Numer katalogowy	<b>RINO SHOWER NEW</b>
Kod producenta	<b>RINO SHOWER NEW</b>
Producent	<b>Pic Solution</b>
CE	<b>To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą</b>

### Opis produktu

#### Irygator / nebulizator PiC Solution Rino Shower

Najnowszy model mikronizującego irygatora PiC Solution z delikatnymi końcówkami

Idealny do nawilżania i oczyszczania jamy nosowej, zatok

Przeznaczony do nawilżania i oczyszczania jamy nosowej, nosogardzieli. Usuwa wydzieliny, śluz i katar

Wytwarzane przez Rino Shower cząsteczki posiadają średnicę odpowiednią do górnych dróg oddechowych

Dla większej higieny i wygody terapii, posiada wbudowany pojemnik na wydzieliny.

Zaufaj 50-letniemu doświadczeniu w tworzeniu innowacyjnych i prostych w użyciu rozwiązań do domowej i profesjonalnej opieki zdrowotnej!

Opis produktu:

- do oczyszczenia nozdrzy i usunięcia wydzielin przed terapią nebulizacyjną dla zwiększenia jej efektywności poprzez oczyszczenie górnych dróg oddechowych
- do terapii z dodatkiem zaleczonego lekarstwa
- 2 miękkie końcówki (dla dorosłych i dla dzieci)
- higiena i wygoda - wbudowany pojemnik na wydzieliny
- pojemność zbiornika na roztwór do irygacji: 8 ml
- prosta obsługa jednym przyciskiem
- łatwe czyszczenie

#### Sposób użycia:

1. ściągnąć nasadkę donosową, wyciągnąć niebieski pojemnik
2. wlać sól fizjologiczną (max 8 ml)
3. włożyć niebieski pojemnik, założyć nasadkę donosową
4. podłączyć wężyk z inhalatora tłokowego i uruchomić kompresor
5. zbliżyć pojemnik do nosa
6. uruchomić irygację zatykając palcem otwór w obudowie irygatora

---

Uwaga: Rino Shower współpracuje z inhalatorem tłokowym, nie pracuje samodzielnie  
(nie jest kompatybilny z inhalatorami Omron C802, Omron C803)

W zestawie:

- Irygator PiC Solution Rino Shower New
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Karta gwarancyjna
- Dowód zakupu: paragon lub faktura vat

**Gwarancja:** 2 lata

## Bezpieczeństwo

**Informacje o producencie i osobie odpowiedzialnej:** Produkt wprowadzony do obrotu przed 13.12.2024r.