

Link do produktu: <https://sklepmedyczny.net/pikflometr-personal-best-p-127.html>

Pikflometr Personal Best

Cena	89,90 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	1 dzień
Numer katalogowy	PIKFLOPERSONALBEST
Kod producenta	PIKFLOPERSONALBEST
Producent	Philips
CE	To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą

Opis produktu

Pikflometr Philips Respironics Personal Best Uniwersalny 60-800 l/min dla dzieci i dla dorosłych

Opis produktu:

- Szybkie i precyzyjne pomiary PEFR
- Łatwy w użyciu
- Łatwa do odczytania skala
- Kolorowe znaczniki trzech stref nasilenia choroby
- Unikalna konstrukcja zapewnia wygodny transport i przechowywanie

- Pikflometr "Personal Best" firmy Philips Respironics to bardzo wygodny, przenośny przyrząd diagnostyczny służący do pomiaru szczytowego przepływu wydechowego - PEFR.

Przyrząd ten służy do kontrolowania czynności układu oddechowego.

Wynik pomiarów zależy od samopoczucia i wieku pacjenta. Gdy przepływ powietrza w płucach jest zaburzony, wyniki pomiarów są niskie i oznacza to, że może być zaostrzona obturacja.

Jeśli będziesz wykonywać **pomiary PEFR** systematycznie i codziennie dokonywać pomiarów **Pikflometrem Personal Best Philips Respironics**, już na kilka godzin wcześniej (przed pojawieniem się napadu duszności, czy innych objawów), po uzgodnieniu z lekarzem będziesz mógł zwiększyć dawkę leku lub włączyć lek, który lekarz zapisał w razie pogorszenia stanu zdrowia. Dawka i rodzaj przyjmowanych leków musi być zawsze konsultowane z lekarzem prowadzącym. Zmniejszenie wartości PEFR przy pomiarze może nastąpić gwałtownie w ciągu jednego dnia, lub powoli i systematycznie przez kilka dni. Często zdarza się, że temu powolnemu spadkowi PEFR nie towarzyszą inne, zewnętrzne objawy obturacji oskrzeli, ale wczesne zauważenie spadku wartości PEFR umożliwi wcześniejszą interwencję, a w wielu przypadkach uchroni od konieczności leczenia w warunkach szpitalnych.

- **STREFY POMIAROWE (zielona, żółta, czerwona)**

Równoległe do podstawowej skali PEFR, Personal Best posiada dodatkowe, indywidualnie ustawiane strefy. Raz ustawione przez lekarza pozwalają na natychmiastową ocenę indywidualnego wydychanego PEFR, kwalifikując go do odpowiedniej strefy, z którą wiąże się konieczność odpowiedniego postępowania.

STREFA ZIELONA - wartość PEFR mieści się w zakresie 100-80% wartości należnej i wówczas: nie występuje kaszel ani świszczący oddech, łatwość pokonywania wysiłku, nie korzysta się z dodatkowych wdechów leków rozszerzających oskrzela

STREFA ŻÓŁTA - wartość PEFR mieści się w zakresie 80-60% wartości należnej i wówczas: należy zwiększyć dawkę leku, lub stosuje

częściej niż normalnie, pojawiają się objawy zaostrzenia astmy: kaszel, świszczący oddech, duszność, pojawiają się trudności w oddychaniu podczas wysiłku, być może rozpoczęła się grypa lub infekcja kataralna
STREFA CZERWONA- wartość PEFR mieści się w zakresie poniżej 60% wartości należytnej i wówczas: świadczy to o ciężkim zaostrzeniu astmy, po podaniu leków rozszerzających oskrzela poprawa jest krótkotrwała lub jest jej brak, zapisy PEFR nie odpowiadają na stosowane leczenie wziewnym lekiem rozszerzającym oskrzela, a nawet mogą się pogarszać, mimo podawania leków duszność narasta, strefa czerwona to sygnał, aby natychmiast skontaktować się z lekarzem!

Dane techniczne:

- Dokładność: 5%
- Powtarzalność: 1%
- Zmienność: 5%
- Wymiary: 165 x 51 x 20 [mm]
- Zakres: 60-800 l/min
- Dokładność: 10 l/min
- Dokładność: 5 l/min

Pikfometr Philips Respironics Personal Best odpowiada wymaganiom określonym w U.S.National Education Program Technical Standards for Peak Flow Meters (American Thoracic Society Spirometry Waveform 24)

W zestawie:

- **Pikfometr Personal Best**
- Instrukcja obsługi w jęz. polskim
- Dowód zakupu

Gwarancja: 2 lata na niezawodność pomiarów

Bezpieczeństwo

Informacje o producencie i osobie odpowiedzialnej: Produkt wprowadzony do obrotu przed 13.12.2024r.